

## MASQUE KN95

### MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE ÉQUIVALENT FFP2



#### Caractéristiques

Masque de protection respiratoire **KN95** pliable (équivalent FFP2). De forme trapézoïdale, ce masque filtre avec succès 95% des gouttelettes et des particules en suspension dans l'air. Masque à usage unique.

#### Caractéristiques techniques

- Taille unique, adaptée à la morphologie d'un visage adulte.
- Masque non conçu pour les enfants.
- Matériaux : 4 couches de tissu non tissé, haute filtration 95%.
- Élastiques de fixation en caoutchouc.
- Barrette nasale métallique réglable.
- Coloris blanc.
- Dimensions boîte : 165 x 105 x 90 mm.

#### Points forts

- Offre une excellente adaptation au visage et donc un excellent niveau de protection.
- Peut être porté 8 heures d'affilé.
- Testé et certifié **conforme à la norme CE EN149:2001 + A1:2009**.
- Plus efficace que la plupart des masques jetables.
- Conformément aux informations de l'INRS, ce masque KN95 d'équivalence FFP2 peut être utilisé pour la protection contre la COVID-19.

#### Stockage et péremption

- Le délai de péremption des masques **KN95** est de 4 à 5 ans à compter de la date de fabrication.
- Il est préconisé de conserver les masques **KN95** entre 10 et 25 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

#### Référence et conditionnement

**Réf. M0275** : Boîtes de 20 masques

#### Précautions et instructions d'emploi

Pour être efficace, le masque doit être utilisé correctement :

- Se laver les mains.
  - Placer le masque sur le visage, la barrette nasale sur le nez.
  - Tenir le masque et passer les élastiques derrière la tête dans les croiser.
  - Princier la barrette nasale avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez.
  - Vérifier que le masque soit bien mis.
- Pour cela il convient de contrôler l'étanchéité :

- Couvrir la surface filtrante du masque en utilisant une feuille plastique maintenue en place avec les deux mains.
- Inspirer : le masque doit se écraser légèrement sur le visage.
- Si le masque ne se plaque pas, c'est qu'il n'est pas étanche et il faut le réajuster.
- Après plusieurs tentatives, changez le modèle car il n'est pas adapté.

- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains et ne pas le placer en position d'attente sous le menton ou sur le front, pour éviter de contaminer l'intérieur du masque.

#### AVERTISSEMENT

Assurez-vous toujours que le masque :

- convient à l'application pour laquelle il est utilisé ;
- est correctement ajusté ;
- est porté pendant toutes les périodes d'exposition ;
- est remplacé dès que nécessaire.

Avant toute application de produit, l'utilisateur devra avoir reçu une formation préalable à sa bonne utilisation en accord avec les normes/directives de santé et de sécurité applicables.

N'utilisez pas ce produit si vous portez une barbe ou toute autre pilosité faciale susceptible d'empêcher un contact parfait entre le visage et le bord du masque.

Quittez immédiatement la zone contaminée si :

- la respiration devient difficile ;
- vous souffrez de vertiges ou d'autres troubles.

Jetez et remplacez le masque s'il est endommagé, si la résistance respiratoire devient trop importante ou en fin de travail.